

Gilet Percko

Anti mal de dos - Lyne Pro



Caractéristiques



Points forts

Protège
votre dos

Diminue votre
fatigue
musculaire

Limite le risque
de blessures

Composition - polyamide et élasthanne

Entretien

- se lave en machine à 30°C.
Attention, il ne peut être séché en machine, repassé ou nettoyé à sec.

• Comment le mettre ?

1

- Une fois le gilet enfilé, **tirez les extrémités vers le bas.**
- Les tenseurs doivent être placés au niveau de vos épaules et de vos lombaires.



2

- La **boucle** qui permet de fermer le gilet **doit être centrée** pour garantir un bon équilibre des tenseurs.
- Deux sangles vous permettent d'ajuster Lyne PRO à votre taille.

3

- Vous pouvez le porter toute la journée au dessus de vos vêtements.
- Des **attaches** sont **présentes** en bas du gilet que vous pouvez attacher au niveau de la ceinture.

